

TT.way



**LAS 4 REGLAS
DE ORO**

1



APLICA T-WAY SOBRE LA PIEL SECA Y LIMPIA

Antes de cada aplicación, acuérdate de **limpiar el área interesada con una gasa y alcohol** y esperar a que **se seque por completo**.

Evita la colocación de T-Way inmediatamente después de la ducha, sobre la piel húmeda o tras el uso de cremas.

2



EFFECTÚA LA INYECCIÓN DE MANERA PERFECTA

En el momento de administrar la terapia, **perfora el tapón en el centro**, entrando lentamente con la **aguja de forma perpendicular** y gira levemente el inyector con los dedos hasta **introducir la aguja por completo**.

Al término de la inyección, acuérdate de **esperar 5 segundos como mínimo** antes de sacar delicadamente la aguja.

3



EVITA LOS GOLPES

Evita **golpes y/o esfuerzos violentos** sobre el dispositivo durante el uso.

4



ACUÉRDATE DE LEER LAS INSTRUCCIONES

Tómate un momento para **leer atentamente las instrucciones** de uso presentes en el envase de T-Way y mirar las **ilustraciones explicativas** sobre el uso de los productos.

En el **portal T-Care**, puedes consultar también el **vídeo de instrucciones sobre el modo idóneo de utilizar T-Way**.

MKT_114ES_02 2023-10

Ttheras

theras-group.com